

135°C  
3分滅菌

丸カスト  
18x2<sup>個用</sup>

手軽な使いやすさが自慢の  
スライドロック式オートクレーブ。



小型包装品用高圧蒸気滅菌器

**YS-A-C006J**

# 小型包装品用高圧蒸気滅菌器(スライドロックタイプ)

丸カスト  
**18x2**  
cm 個用

## 手軽な使い易さが自慢のオートクレーブ。



### 1 使い手に優しい工夫を施しました

- イラストキーで滅菌法に準拠したワンタッチ運転が可能です。
- 給水タンク容量を大きく(4ℓ)とり、水の補充回数を少なく済ませます。

### 2 安心設計がさらに進化しました

- 滅菌法の内容に満たない設定不備は、エラー表示します。
- 温度が過剰上昇した場合には、警告表示でお知らせします。
- 開閉音の小さい電磁弁の使用で、動作音を小さく抑えています。

### 耐震マットもご用意。


～ユヤマクレーブは最新かつ細心の耐震対策を施しています。

地震大国、日本。記憶に新しいところでも、阪神淡路大震災や中越地震など、痛ましい被害を生んだ大規模な地震が思い起こされます。医療現場ではその使用が常に欠かせないオートクレーブこそ、耐震対策が求められるのではないのでしょうか。ユヤマクレーブでは、最下部に耐震専用金具(右写真)を取り付け、耐震マットをオプションでご用意。



### これは便利!予約滅菌機能も装備!

#### 予約

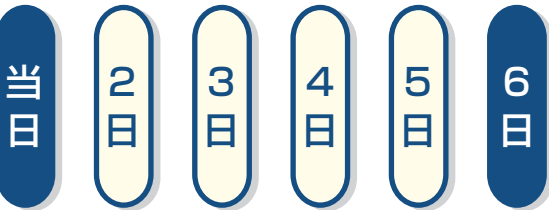


予約滅菌機能を装備していますので、長期にわたる休診直後の業務もスムーズに行えます。予約日は当日を含めて6日分まで可能です。



●イラストキー



●設定不備はエラー音で告知

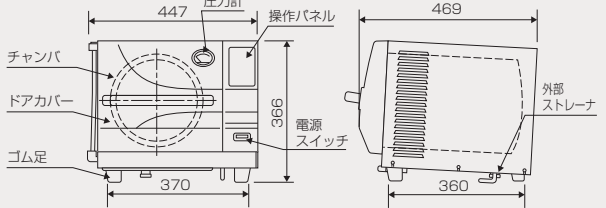

■仕様

製品名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
型式	YS-A-C006J
外形寸法	幅447×奥行469×高さ366mm(但し、部分突起物を除く)
チャンバ寸法	直径246×奥行360mm 16.5ℓ(但し、チャンバ入口直径191mm)
滅菌温度	135/121/115℃、及び液体滅菌121℃(但し、115℃~136℃迄1℃単位で設定可能)
滅菌時間	標準設定 3/20/30分/30分(135/121/115℃及び液体滅菌121℃)(但し、標準設定時間から60分迄1分単位で設定可能)
乾燥時間	初期設定30分(但し、0~95分迄、5分単位で任意時間設定可能)
圧力計	0~0.4MPa
予約	6日
安全弁吹出圧力	0.23MPa
給水タンク容量	4ℓ
液体滅菌容量	500ml 滅菌びん 最大3本
安全装置	安全弁、漏電ブレーカー、過熱防止バイメタル、空焚防止バイメタル、ドアセットセンサー、電流ヒューズ
電撃に対する保護の形式	クラス I
電源電圧	AC100V±10V 50/60Hz 消費電力 / 1.2kVA
表示	時計・予約・温度・滅菌・乾燥
工程表示	ドア・給水・加熱・滅菌・乾燥・完了
質量	26.5kg
医療機器クラス分類	クラス II (特定保守管理医療機器)
E M C 適合	JIS C 1806-1:2010に適合
薬事認証番号	219AABZX00051000

Your Partner in Medication



製造販売業者 湯山製作所

販売業者 ヌ ヤ マ

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号  
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号  
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

[医療機器製造販売業許可番号]27B2X00001 [医療機器製造業許可番号]27B2200564本社工場

カタログの掲載内容は2021年8月現在のものです。

製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の  
活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」  
「無菌製剤室を作ろう!」



1490003  
(株)ユヤマ



(株)湯山製作所